

骨と筋肉と、メディエイド。

**MEDIAID**

# メディエイド アシストギア

腰ユニット

PRODUCT CATALOG



# MEDIAID



メディエイドは医療分野(=Medical メディカル)で培ったノウハウを  
ベースに確かな実績に基づく高品質で安全な製品開発を行い、  
人の活動を支え・助ける(=Aid)ブランドです。



MEDIAID(メディエイド)は、  
整形外科で確かな実績を持つ「日本シグマックス」のブランドです。

日本シグマックスのルーツは「医療」です。

日常で困りごとを持ちながら日々の生活を送っている方たちに、医療現場で得た確かな知識と技術で、  
真に効果のあるサポートを提供したい、という思いからMEDIAIDを作りました。

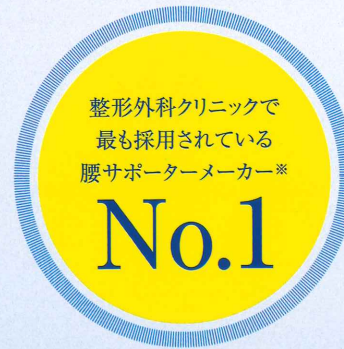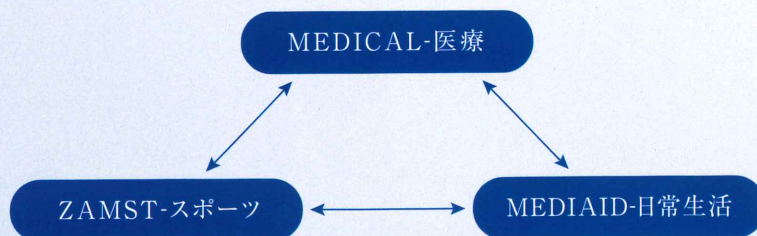

※(株)日本能率協会総合研究所調べ

調査実施時期:2020年10月~11月(インターネット調査) 調査対象:全国の整形外科クリニックの院長 回答者数:300S

医療で培った技術でひとのカラダを支えて助ける

メディエイド サポーターから

辛い姿勢をサポートし、作業負担を軽減する

メディエイド アシストギアへ

## メディエイド アシストギア

腰ユニット **登場**



# 機能性と快適性を併せ持ち 作業者の動作を支える

## メディエイド アシストギア 腰ユニット

### 機能 ①

#### 前傾姿勢を サポート

腰を中心とした上下パーツを連結することで、太ももから腰に向かって張力が働き、前傾姿勢の腰への負担を軽減します。



### 機能 ②

#### 持ち上げ姿勢を サポート

太ももベルトとクロステープの適度な伸縮性により、荷物の上げ下げに伴う腰まわりの負担を軽減します。



### 機能 ③

#### 作業姿勢を サポート

腰ベルトの腹腔圧上昇効果により腰を安定させて、長時間の同じ姿勢による負担を軽減します。





## 快適性 ①

人体構造に即した設計と、パーツごとの適度な伸縮性により、作業姿勢をサポートしつつも動きを妨げません。

## 快適性 ②

背中と腰のバックパネル、太ももベルトには、通気性に優れたメッシュ素材を使用し、長時間の着用時も快適です。



## 快適性 ③

ベルトやストラップの締め具合を調整することで、休憩時間はすぐにリラックスできます。



## 快適性 ④

上下パーツ合わせて約460g\*の軽量設計で、装着時の負担を軽減します。\*Lサイズ



ネットに入れば通常の洗濯機で洗濯可能です。

※乾燥機の使用はできません



# 各部の名称

## <上パーツ・前側>



## <下パーツ・前側>



## <上パーツ・後側>



## <下パーツ・後側>



商品名	サイズ	適用範囲	品番	JANコード	希望小売価格	個装サイズ
メディエイド アシストギア	腰ユニット 上パーツ	S (身長) 155~165cm	307601	4946452070467	10,000円 (本体価格)	(袋入り) 高さ: 約400mm 幅: 280mm
	腰ユニット 上パーツ	M (身長) 165~175cm	307602	4946452070474		
	腰ユニット 上パーツ	L (身長) 175~185cm	307603	4946452070481		
	腰ユニット 下パーツ	S (ウエストサイズ) 65~75cm	307611	4946452070498	15,000円 (本体価格)	
	腰ユニット 下パーツ	M (ウエストサイズ) 75~85cm	307612	4946452070504		
	腰ユニット 下パーツ	L (ウエストサイズ) 85~95cm	307613	4946452070511		


上パーツと下パーツを一緒にご使用ください。単体でのご使用では機能が発揮されません。

- 本製品は使用状況によって、サポートできない場合があります。
- 本製品は治療用の製品ではありません。
- 本製品は自分の持つ以上の力を発揮する効果はありません。  
過度に重たいものを持ち上げることや、必要以上に負担のかかる姿勢をとることは避けてください。

### ●サイズの選び方

上パーツは、身長に合わせて選んでください。  
下パーツは、ウエストサイズに合わせて選んでください。  
ウエストサイズはへその位置を目安に計測してください。  
計測値が2サイズのさかいになった場合は、  
大きい方のサイズを選んでください。

### 下パーツ計測位置

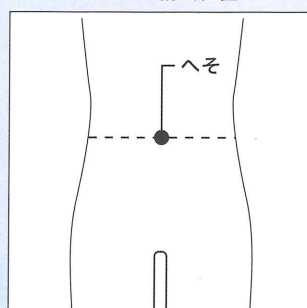

# 装着手順


●面ファスナーをすべて取り外し、製品の向きを確かめてください。

装着動画はこちら


<https://youtu.be/8jsuJuybRhs>





① 上パートと下パートのバックルを連結します。

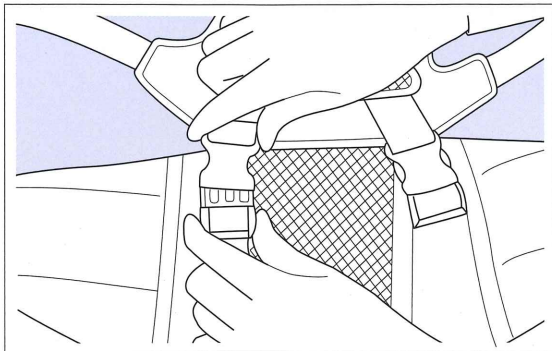


② バックルストラップを調節します。

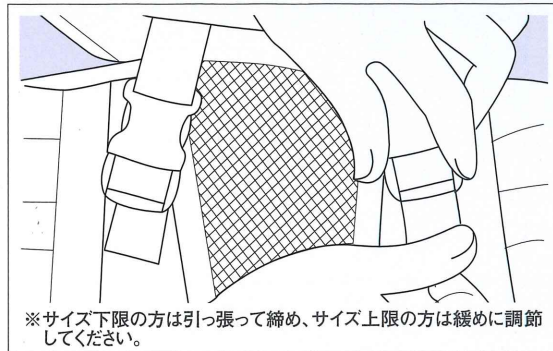

③ 上パートの肩ベルトに腕を通します。

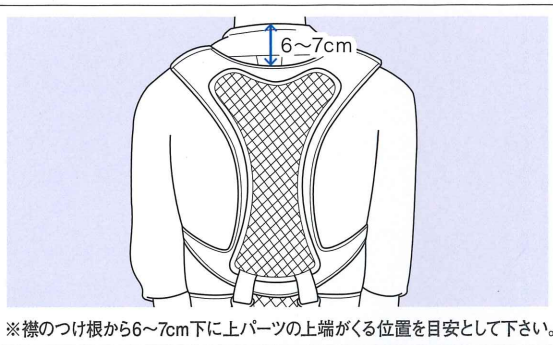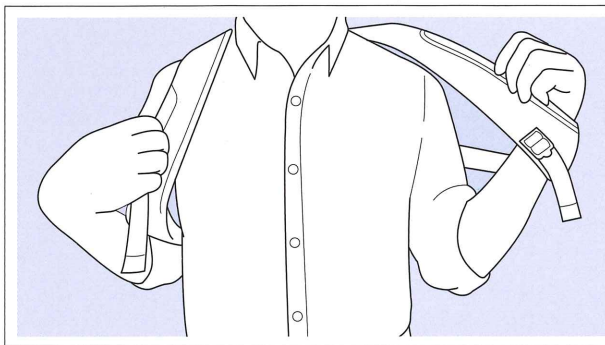


④ 前合わせ部を引っ張り、とめます。

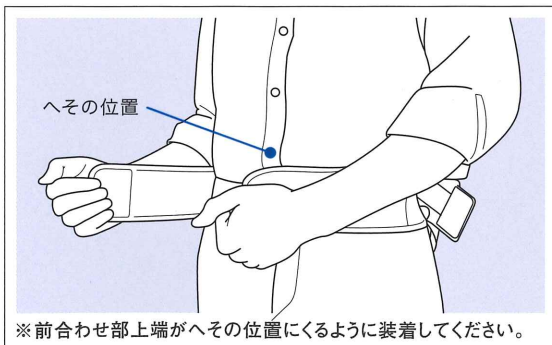


⑤ 太ももベルトを調節します。



⑥ 補強ベルトを引っ張り、とめます。

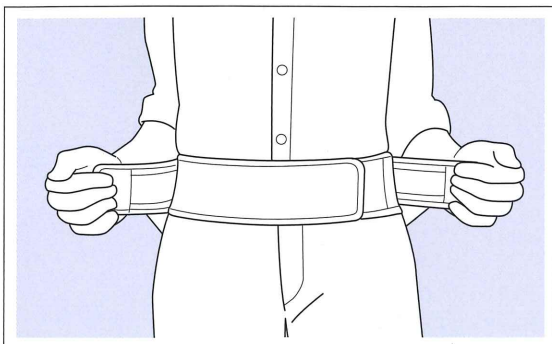

⑦ 調節ストラップを引っ張り、フィットさせます。

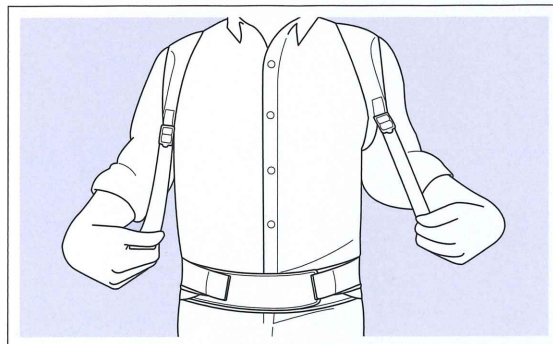

⑧ 製品のゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。